

CLIKSTAR®


HIZLI KILAVUZ



YSize ClikStar tekrar kullanılabilir insülin kalemındaki Lantus (insülin glargin) veya Apidra (insülin glulisin) verildi.

Bu hızlı kılavuz ClikStar'ınızı nasıl kullanacağınıza dair bilgiler içerir. ClikStar paketindeki talimatlarda daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

ClikStar ve parçaları

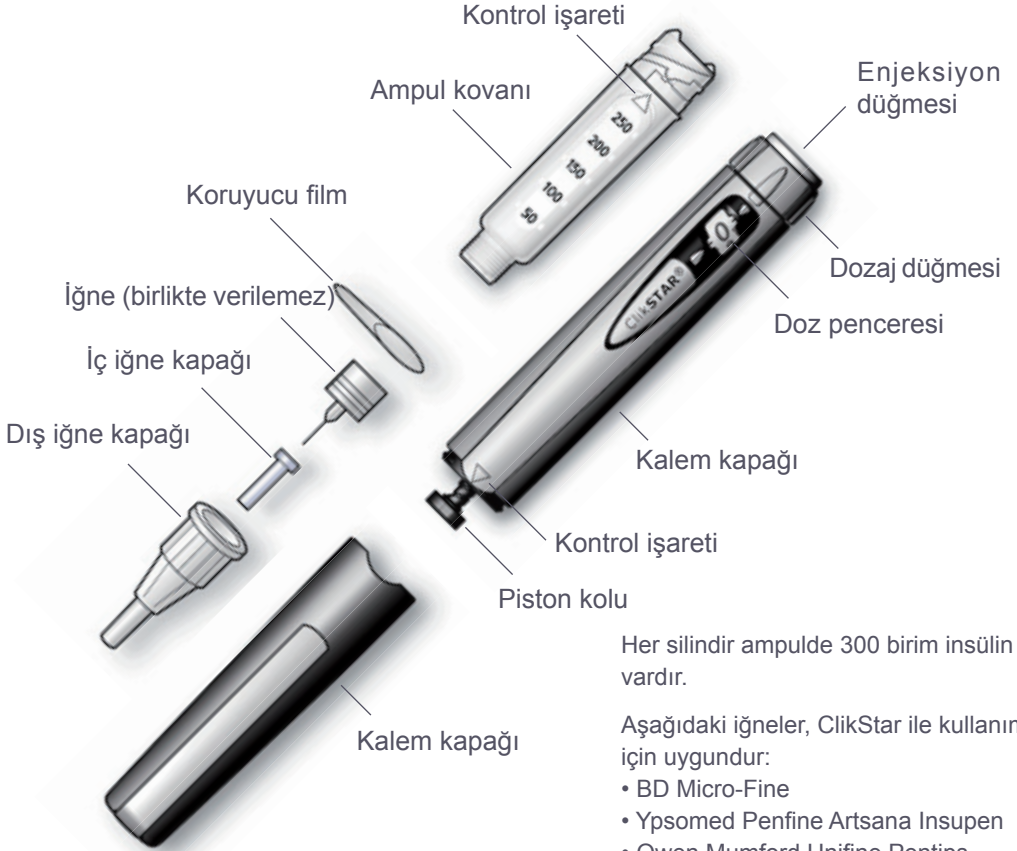

Her silindirik ampulde 300 birim insülin vardır.

Aşağıdaki iğneler, ClikStar ile kullanım için uygundur:


- BD Micro-Fine
- Ypsomed Penfine Artsana Insupen
- Owen Mumford Unifine Pentips.

Onaylı iğnelerle ilgili en son güncellemelere ve daha fazla bilgiye www.insulin.se adresinden ulaşabilirsiniz


Ba langıç

Her enjeksiyondan önce güvenlik testi yapınız


1 Kalem kapağını çıkarınız. Ampul kovanını kalem gövdesinden çıkarınız. Yeni silindirik ampulü ampul kovanına takınız.

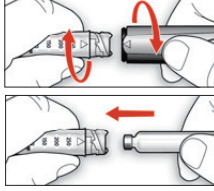


2 Ampul kovanının yardımıyla piston kolunu düz şekilde içeriye itiniz. Piston kolunu parmağınızı kullanarak da itebilirsiniz.

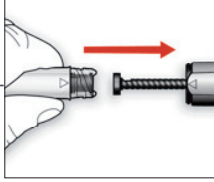


3 Ampul kovanını, "klik" sesiyle yerine oturana ve işaretler hizalana kadar kalem gövdesine yerleştiriniz.

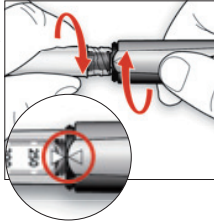


4 Bir iğneyi doğrudan kaleme takınız. Kullandığınız iğne türüne göre iğneyi sıkınız ya da itiniz.

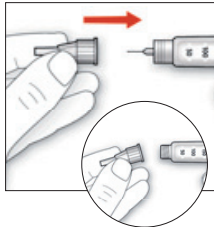


5 Dozaj düğmesini çevirerek 2 birimlik doz seçiniz. Dış ve iç iğne kapaklarını çıkarınız.

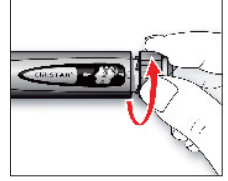

6 Kalem i, iğne yukarı bakacak şekilde tutunuz. İnsülin haznesine vurarak hava kabarcığı varsa çıkarınız.

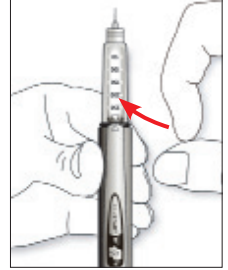


7 Enjeksiyon düğmesine tamamen basınız. İğnenin ucundan insülin çıktığını ve doz penceresinde "0" yazısının görüldüğünü kontrol ediniz.

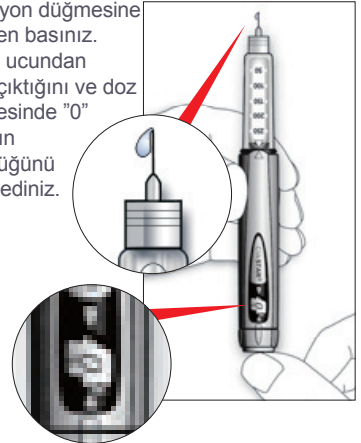

Dozu ayarlayınız ve enjekte edi-


1

Gerekli dozu ayarlayınız. Enjekte etmek istediğiniz birimi aşarsanız, doğru birime dönmeniz yeterlidir.

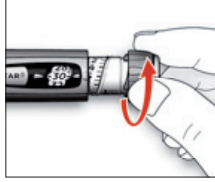


2

Diyabet hemşiresinin veya doktorunuzun size gösterdiği şekilde dozunuzu enjekte ediniz. İğneyi derinize batırınız ve enjeksiyon düğmesine tamamen basınız. Enjekte ederken doz penceresi "0" a kadar geri sayar.

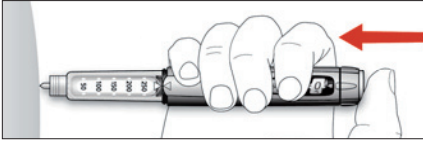

3



Enjeksiyon düğmesini içeride tutunuz ve 10'a kadar sayıp sonra iğneyi çıkarınız.

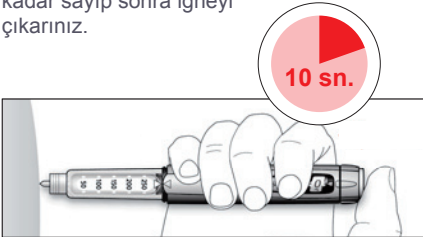

Enjekte ettiğinizde

4

Dış iğne kapağını takınız ve iğneyi çıkarınız. İğneyi talimatlara uygun şekilde atınız. Kalem kapağını ClikStar'ınıza yerleştiriniz ve güvenli bir yere koyunuz.

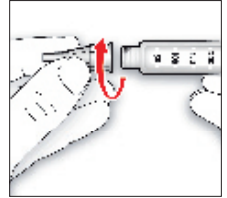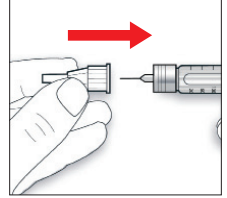

NOT!

ClikStar'ı iğnesiz muhafaza etmek için enjeksiyondan sonra her zaman iğneyi çıkarınız. Bu, kirlenme, hava kabarcıkları ve insülin kaçağının önlenmesine yardımcı olur.

Puçları ve tavsiyeler

Kullanmadan önce

- Her enjeksiyondan önce daima yeni bir iğne kullanınız.
- Doğru türde insülin kullandığınızdan emin olmak için kullanmadan önce daima insülin üzerindeki etiketi kontrol ediniz..

Kullanım

- Zarar görmüş silindir ampullerini asla kullanmayınız.
- Zarar görmesi ya da doğru çalışmaması durumunda asla ClikStar'ı kullanmayınız.
- Farklı türde insülinler kullanıyorsanız, her insülin türü için farklı renkte kalem kullanmanız gerekir.

Gereken dozu ayarlayamıyorsanız, silindir ampulde yeterli insülin olduğunu kontrol ediniz. Silindir ampulde yeterli insülin kalmadıysa aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Silindir ampulde kalan miktarı enjekte ediniz ve yeni bir silindir ampul kullanarak dozu ayarlayınız.
- Ya da tam dozu enjekte etmek için yeni bir silindir ampul kullanınız.

Dozaj düğmesini asla zorlamayınız.

İnsülin azaldığında, silindir ampulün kademeli ölçeğinde ne kadar insülin kaldığını görebilirsiniz. Bu ölçek ne kadar insülin kaldığı

hakkında yalnızca genel bir fikir vermektedir ve hassas doz ölçümü için kullanılmamalıdır.

ClikStar'ınızın muhafaza edilmesi

- Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Silindir ampul soğuk bir yerde muhafaza ediliyorsa (örneğin buzdolabında), enjekte etmeden önce ısınmasını sağlamak için 1-2 saat süreyle dolaptan dışarıya çıkarınız.
- Silindir ampul çalıştırıldığında, normal koşullarda 28 güne kadar kullanılabilir.
- 4 yıl süreyle kullandıktan sonra, ClikStar kalemi tıbbi personelin talimatlarına ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde atmanız gerekmektedir.
- ClikStar'ınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Muhafaza etmekle ilgili ayrıntılı bilgi için insülin paketindeki broşüre bakınız.

ClikStar'ınızın dış kısmını temizlemeniz gerekiyorsa, ürünü nemli bir bezle silebilirsiniz. ClikStar'ınızı ıslatmayınız ya da yıkamayınız.

www.insulin.se adresinde diyabetle ilgili başka bilgiler bulabilirsiniz
www.fass.se adresinden farklı insülinlerle ilgili bilgi edinebilirsiniz

sanofi-aventis AB, Tel: +46 (0)8 - 634 50 00. www.sanofi-aventis.se
İlaçlarımızla ilgili sorularınız varsa, aşağıdaki adrese başvurunuz: infoavd@sanofi-aventis.com
Clikstar, CE işaretine sahiptir.

sanofi aventis
Because health matters